

RECONSTRUÇÃO

Indicação

As placas para reconstrução são aplicáveis a procedimento de cirurgia com finalidade de recomposição de perda óssea na mandíbula e/ou maxila, sendo indicados para reabilitação de pacientes com defeitos ósseos em decorrência de fatores patológicos, tumorais ou trauma.



As próteses são fabricadas em adaptação à anatomia e necessidades específicas do paciente, de acordo com projeto especificado pelo profissional responsável.

Contraindicação

As placas para reconstrução de mandíbula e maxila não devem ser utilizadas em pacientes com uma ou mais das seguintes condições:

- Infecções presentes na região de implantação.
- Bruxismo, seja ele primário ou secundário.
- Condições sistêmicas com aumento de suscetibilidade às infecções, tais como imunossupressão e/ou condições que dificultam o processo de reparo, como por exemplo diabetes não controlada, alcoolismo, tabagismo.
- Alergia a qualquer dos componentes presentes no implante.
- Presença de transtornos que impossibilitam adesão às orientações médicas.
- Desenvolvimento ósseo incompleto/imaturo, como por exemplo em crianças. O mau uso do implante ou a sua fixação imprópria podem levar ao afrouxamento dos parafusos, fraturas e/ou falha do tratamento.
- Eletrocirurgias, exposição à radiação e quimioterapias podem afetar a funcionalidade das placas para reconstrução de mandíbula e maxila.

Cuidados e Advertências

- ✓ Os componentes das placas de reconstrução de mandíbula e maxila são ESTÉREIS.
- ✓ Produto de USO ÚNICO. NÃO REUTILIZAR OU REPROCESSAR.
- ✓ A implantação das placas para reconstrução de mandíbula e maxila deve ser realizado por profissional habilitado, em ambiente cirúrgico e com instrumentais devidamente esterilizados.
- ✓ A aplicação de cargas excessivas aumenta os riscos de deformações, trincas e fraturas no implante.



Não utilizar em caso de fraturas ou sinais de fragilidade na estrutura do implante. ✓

Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada ou com o lacre violado. ✓

Não utilizar o produto caso esteja danificado. ✓

Não utilizar o produto fora do prazo de validade. ✓

Não utilizar caso o modelo/referência apresentar divergência. ✓

Utilizar somente produtos compatíveis fabricados pela CPMH para garantir a segurança e eficácia da instalação do dispositivo. ✓

Eventos Adversos

Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidade de complicações. Alguns riscos comuns a todo e qualquer procedimento cirúrgico são:

- Infecção, sangramento, parestesia, risco anestésico, entre outros.
- Afrouxamento, deslocamento ou fratura dos componentes.
- Comprometimento vascular ou neurológico em virtude do ato cirúrgico.
- Sensação de dor, desconforto ou incômodo.
- Edema, hematomas, inflamação, infecção, esfoliação, formação de abscesso, hiperplasia, irregularidades gengivais, complicações associadas com anestesia, falha do implante ou exposição.